

# RenoBody アプリ連携マニュアル



## 目次

- RenoBody登録.....P.3～9
- ウォーキングキャンペーンサイトと  
RenoBody連携.....P.10～12



## RenoBody初期登録①



### 1 アカウント登録

「新規登録」をタップしてください。

※以前登録したことがある方は  
「ログイン」をタップしてください。

規約確認

ご登録には規約への同意が必要です。  
利用規約をお読みいただき、チェックボックスにチェックを入れて「初期設定へ進む」をタップしてください。

☒ RenoBody利用規約へ同意

登録へ進む

前の画面に戻る



「RenoBody利用規約へ同意」に  
チェックをして、「登録へ進む」  
をタップしてください。

## RenoBody初期登録②

**新規登録**  
お客様のアカウント情報を設定します。  
既にアカウントをお持ちの方は、前の画面に戻って「ログイン」よりお進みください。

**メールアドレス登録の場合**

- ・メールアドレスで登録される場合は、以下の登録後に「確認メール」を送信いたしますので、メール本文に記載しているURLをタップしてください。
- ・ご登録前に「@renobody.jp」のメール受信許可をお願いいたします。

※パスワードは8文字以上16文字以内、英字と数字を組み合わせで入力してください。

☐ メールアドレスを保存する

**登録する**

**SNSアカウントで作成する**

Appleでサインイン

Google IDでログイン

Facebook IDでログイン

Twitter IDでログイン

ID au IDでログイン

## 2 アカウント作成

※パスワードは8文字以上16文字以内、英字と数字を組み合わせで入力してください。

☐ メールアドレスを保存する

**登録する**

**SNSアカウントで作成する**

Appleでサインイン

Google IDでログイン

Facebook IDでログイン

Twitter IDでログイン


ID au IDでログイン

**メールアドレス**または**SNSアカウント**で登録できます。

**メールアドレス**で登録する場合は、ユーザー名（ニックネーム）、メールアドレス、パスワード、パスワード（確認用）を入力の上、「登録する」をタップしてください。

**SNSアカウント**で登録する場合は、初期登録⑤にお進みください。

## RenoBody初期登録③

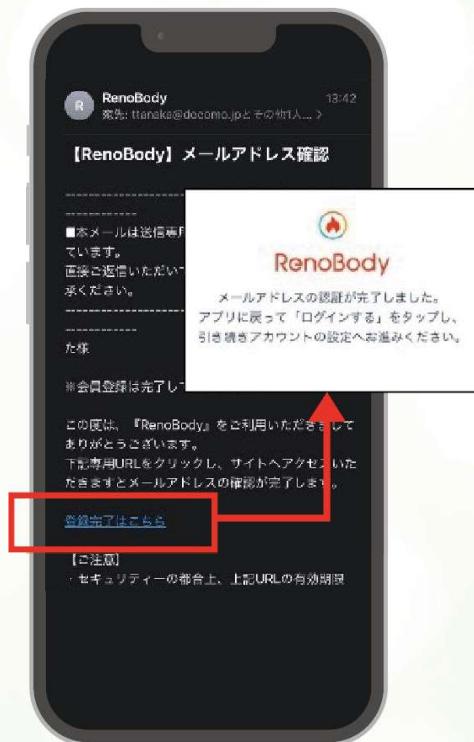

### 3 メールアドレス認証

**メールアドレス**で登録する場合、入力したメールアドレス宛に認証メールが届きます。**登録完了はこちら（URLリンク）**をタップしてください。

#### ■メールが届かない場合

○メールアドレスが正しく入力されているかご確認ください。○メールアドレスは半角入力し、スペースは空けないようにご注意ください。○迷惑メールフォルダに入っていないか、メールのフィルターが掛かっているか、ご確認ください。  
※ご自身で設定していない場合でも、初期設定でフィルターが掛かっている場合があります。

#### ■メールアドレスが入力出来ない場合

○「半角英数」での入力をお願いします。※全角は入力不可  
○スペースが入っている可能性があります。※スペースは除外

#### ■メールが文字化けする場合

○HTMLメールが使用できるメールアドレスでのご登録をお願いいたします。


## RenoBody初期登録④

### 4 アプリにログインする

「メールアドレスの認証が完了しました」の表示が出たらホーム画面からアプリに戻り、**「ログイン」**のボタンをタップしてください。

※メールアドレス登録完了前にアプリを起動して「ログイン」をタップしても、ログインすることは出来ません。

※ホーム画面からアプリを起動

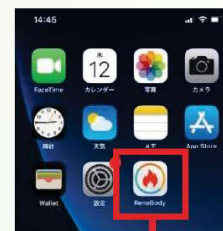

メールアドレスの登録完了後は新規登録ではなく、**必ず「ログイン」**より進んでください。





## RenoBody初期登録⑤

### 5 デバイスを選択する

利用する歩数計測デバイスを選択して  
**「設定する」**をタップしてください。

※ アカウント登録後は  
「MENU>デバイス設定」で変更できます。

▼iPhoneをご利用の場合 ▼Androidをご利用の場合



#### 各計測デバイスについて

##### ■iPhone内蔵歩数計

iOSのシステムを利用して、端末で歩数を計測します。  
バックグラウンド※で起動しておく、自動でデータ同期します。  
(※起動アプリ一覧に表示されている状態)

##### ■iOSヘルスケア

iOSヘルスケアで計測されたデータを利用します。  
バックグラウンド※で起動しておく、自動でデータ同期します。  
(※起動アプリ一覧に表示されている状態)

##### ■スマートフォン歩数計

Androidのシステムを利用して、端末で歩数を計測します。  
計測しない場合は、端末の再起動、または省電力モードやタスクキラーアプリでRenoBodyが許可されているかをご確認ください。  
端末の設定を見直しても計測が不安定な場合は、GoogleFit計測に切り替えてご利用ください。

##### ■Google Fit

Google Fitで計測した歩数データを取得します。  
※ 事前にGoogleFitアプリのダウンロード、設定が必要です。

##### ■活動量計 (Fitbit/Misfit/GARMIN/OMRON Connect)

各活動量計で計測した歩数データを取得します  
※ 事前に各アプリのダウンロード、設定が必要です活動量計と各アプリを定期的に同期してください。各アプリに反映している歩数を同期します。

※ ホーム画面からアプリを起動時に歩数同期します。  
※ 詳細はアプリの「MENU>ヘルプ>FAQ」をご覧ください。

## RenoBody初期登録⑥

### 6 デバイスを設定する

iPhone内蔵歩数計・スマートフォン歩数計以外のデバイスを選んだ場合は、下記の画面が表示します。画面の記載に沿って設定してください。

▼iOSヘルスケアをご利用の場合  
連携するデータカテゴリをオンにしてアクセスを許可してください。



▼Google Fitをご利用の場合  
使用するGoogleアカウントを選択してください。




▼Fitbitをご利用の場合

お持ちのFitbitアカウントを入力してください。データアクセスは全てチェックを入れ許可してください。



▼GARMINをご利用の場合

お持ちのGARMINアカウントを入力し、データ連携を許可してください。

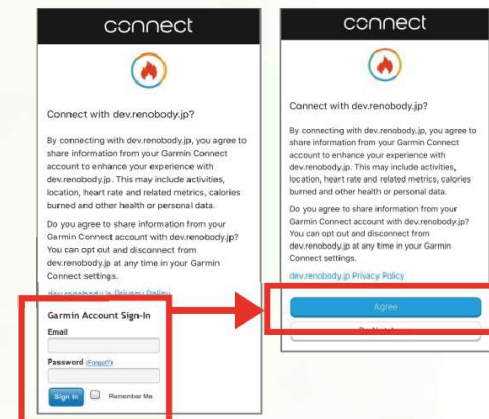



## RenoBody初期登録⑦

身体情報入力

身体情報とアプリの設定を行います。

※身体情報はカロリー計算に使用されますので、正確に入力してください。

※「通知情報」は、サービスからのお知らせのON/OFF設定です。重要なお知らせを配信することがございますので、「ON」への設定を推奨します。

身長(例:158.5cm)

体重(例:58.5kg)

生年月日(形式:19801201)

性別 ☒ 男性 ☐ 女性

ルート計測 ☒ ON ☐ OFF

通知情報 ☒ ON ☐ OFF

**設定する**

### 7 各種設定／設定完了

設定完了



ご自身の情報・利用設定を入力後、「**設定する**」をタップしてください。

※ルート計測はiPhone版のみ対応しています。

※iPhoneの場合、過去7日分の歩数を端末から取得するため、トップ画面に遷移するまで時間がかかる場合があります。

※RenoBodyアプリを起動した際に、別アプリとの歩数連携がされますので、少なくとも一週間に一回は起動してください。



## ウォーキングキャンペーン連携①

### 1 ウォーキングキャンペーンサイトへアクセスしてログイン



The screenshot shows the 'WALKING CAMPAIGN' website. At the top, it says 'ウォーキングキャンペーン'. Below that, a banner image with the text 'ウォーキングで、楽しみながら健康づくり'. In the center, there is a 'ログイン' (Login) section with two input fields: 'メールアドレス' (Email address) and 'パスワード' (Password). Below the password field is a link 'パスワードを忘れた方はこちら' (Click here if you forgot your password). At the bottom of the login section is a 'ログイン' button. Below the login section is a link 'ウォーキングキャンペーンとは?' (What is the Walking Campaign?).

#### ウォーキングキャンペーンWEBサイト

※キャンペーンサイト側で登録したメールアドレス、パスワードでログインします。

RenoBodyアカウント作成時に登録したメールアドレス、パスワードではありません。

## ウォーキングキャンペーン連携②

### 2 RenoBody連携画面へアクセス

#### ウォーキングキャンペーンWEBサイト



## ウォーキングキャンペーン連携③


### 3 RenoBodyへログイン。データ連携を許可して連携完了

RenoBody API WEBサイト

ウォーキングキャンペーン



認証OK

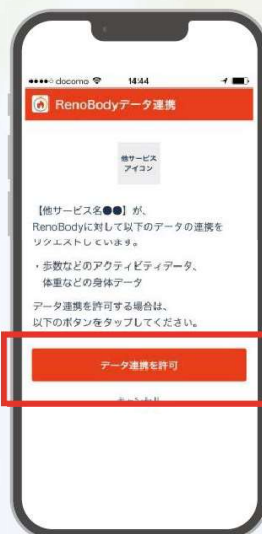

連携完了



※RenoBodyの歩数データはリアルタイムにキャンペーンサイトに反映されません

## 歩数が連携されない…そんなときは①

### RenoBodyで歩数は表示されていますか？



ウォーキングキャンペーンはRenoBodyの歩数を反映いたします。

RenoBody と別アプリ（例：iOSヘルスケアやGoogle Fitなど）を連携させている場合、RenoBodyを起動した際に、別アプリからRenobodyに歩数が連携されます。そのため少なくとも一週間に一度はRenoBodyを起動するようにしましょう。

## 歩数が連携されない…そんなときは②

### 連携したアカウントは使用しているアカウントですか？

RenoBodyのアカウントを複数お持ちの場合、連携したアカウントがお使いになっているアカウントと一致しているかご確認ください。

※ウォーキングキャンペーンで登録したメールアドレスとRenoBodyで登録したメールアドレスは同じでなくてもアカウント連携は可能です。

#### <RenoBodyのアカウント確認方法>



赤枠内に表示されているメールアドレスとP.12でログインしたメールアドレスは一致している必要があります。